




VETERTEST

CENTRO DE DIAGNOSTICO VETERINARIO

**INSTRUCTIVO ENVÍO DE
MUESTRAS
BIOQUÍMICA**

BIOQUÍMICA

- Solicita tubos para recolección de muestras en nuestro Laboratorio.
- Respetar el volumen de muestra indicado por el fabricante en cada tubo.
- Rotula con el **número de pedido** obtenido a través de la solicitud online. Si no la haces mediante la página web, rotula con el número de ficha del paciente y su nombre.
- Envía la muestra en una bolsa hermética. Si no hiciste solicitud de examen online, pega la orden médica por fuera de la bolsa.
- Conservar en temperatura de refrigeración; 2°C – 8°C.
- No congelar.
- Evitar contacto directo con gel pack.

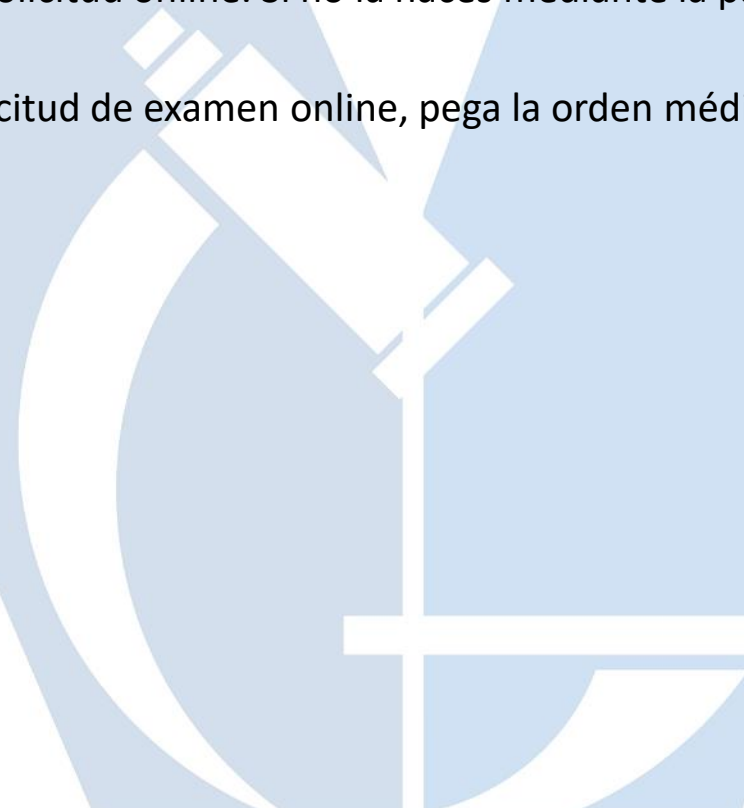

BIOQUÍMICA

SUSTRATOS

| ANÁLISIS | MUESTRA | TUBO |
|---------------------|----------------|-----------------------------|
| Ácidos biliares | Suero o Plasma | Sin anticoagulante/Heparina |
| Álbumina | Suero o Plasma | Sin anticoagulante/Heparina |
| BHB | Suero o Plasma | Sin anticoagulante/Heparina |
| Bilirrubina directa | Suero o Plasma | Sin anticoagulante/Heparina |
| Bilirrubina total | Suero o Plasma | Sin anticoagulante/Heparina |
| Creatinina | Suero o Plasma | Sin anticoagulante/Heparina |
| Colesterol total | Suero o Plasma | Sin anticoagulante/Heparina |
| Fructosamina | Suero o Plasma | Sin anticoagulante/Heparina |
| Globulinas | Suero o Plasma | Sin anticoagulante/Heparina |
| Glucosa | Suero o Plasma | NaF |
| NEFA | Suero | Sin anticoagulante/EDTA |
| Proteínas totales | Suero o Plasma | Sin anticoagulante/Heparina |
| Triglicéridos | Suero o Plasma | Sin anticoagulante/Heparina |
| Urea | Suero o Plasma | Sin anticoagulante/Heparina |

BIOQUÍMICA

MINERALES

| ANÁLISIS | MUESTRA | TUBO |
|----------|----------------|------------------------------|
| Calcio | Suero o Plasma | Sin Anticoagulante/ Heparina |
| Cobre | Suero o Plasma | Sin Anticoagulante |
| Fósforo | Suero o Plasma | Sin Anticoagulante/ Heparina |
| Magnesio | Suero o Plasma | Sin Anticoagulante/ Heparina |
| Zinc | Suero o Plasma | Sin Anticoagulante/ Heparina |

BIOQUÍMICA

ENZIMAS

| ANÁLISIS | MUESTRAS | TUBO |
|----------|----------------|-----------------------------|
| ALP/SAP | Plasma o Suero | Sin Anticoagulante/Heparina |
| ALT/GPT | Plasma o Suero | Sin Anticoagulante/Heparina |
| AST/GOT | Plasma o Suero | Sin Anticoagulante/Heparina |
| CK | Plasma o Suero | Sin Anticoagulante/Heparina |
| GGT | Plasma o Suero | Sin Anticoagulante/Heparina |
| GMD | Plasma o Suero | Sin Anticoagulante/Heparina |
| LDH | Plasma o Suero | Sin Anticoagulante/Heparina |
| Amilasa | Plasma o Suero | Sin Anticoagulante/Heparina |
| Lipasa | Suero | Sin Anticoagulante |