



**VETERTEST**

CENTRO DE DIAGNOSTICO VETERINARIO

**INSTRUCTIVO ENVÍO DE  
MUESTRAS**

**HISTOPATOLOGÍA**

# HISTOPATOLOGÍA

- Descarga nuestro formulario. Recuerda que debes completar todos los datos solicitados con letra legible.
- Fija la muestra en Formalina al 10%, utilizando un volumen 10 a 20 veces mayor que el volumen de tu muestra. Si esta mide más de 1 cm de grosor, realiza cortes para que penetre la formalina.
- Cierra herméticamente el recipiente para evitar filtraciones.
- Rotula con el **número de pedido** obtenido a través de la solicitud online. Si no la haces mediante la pagina web, rotula con el número de ficha del paciente y su nombre.
- El recipiente debe ser enviado dentro de una bolsa hermética. Por fuera, pega el formulario.

Al finalizar agenda el retiro de muestras o despacha directamente a nuestro laboratorio.



## ¿Qué es la Formalina?

Es una mezcla de:

- Formaldehído 37%
  - Metanol 10%
  - Agua 53%
- } Formalina 100%

Preparación de Formalina al 10%:

Diluir 1 ml de Formalina (100%) en 9 mL de agua.