



VETERTEST

CENTRO DE DIAGNOSTICO VETERINARIO

INSTRUCTIVO ENVÍO DE MUESTRAS

PARASITOLOGÍA

PARASITOLOGÍA

Coprológico completo/Sedimentación flotación/Mc Master

- Recolecta la muestra en un recipiente plástico, limpio y hermético.
- Rotula con el **número de pedido** obtenido a través de la solicitud online. Si no la haces mediante la pagina web, rotula con el número de ficha del paciente y su nombre.
- Envía la muestra en una bolsa hermética. Si no hiciste solicitud de exámen online, pega la orden médica por fuera de la bolsa.
- Desde la toma de muestra hasta su envío al laboratorio no deben transcurrir más de 5 días
- En caso de envío de muestras seriadas, enviar 3 muestras, recolectadas día por medio
- Conservar en temperatura de refrigeración; 2°C – 8°C.
- No congelar
- No exponer a la luz del sol
- Puedes solicitar recipiente para toma de muestra en el laboratorio

PARASITOLOGÍA

Ectoparásitos

- Realiza un raspado profundo de la piel.
- Recolecta la muestra en un recipiente plástico, limpio y hermético.
- Rotula con el **número de pedido** obtenido a través de la solicitud online. Si no la haces mediante la pagina web, rotula con el número de ficha del paciente y su nombre.
- Envía la muestra en una bolsa hermética. Si no hiciste solicitud de examen online, pega la orden médica por fuera de la bolsa.
- Desde la toma de muestra hasta su envío al laboratorio no deben transcurrir más de 48 horas.
- Conservar a temperatura ambiente.
- Evitar la exposición directa a la luz del sol.
- Puedes solicitar recipiente para toma de muestra en el laboratorio.